



V.202209 Environmentally friendly. Please promote product by E-Copy brochure.
Print it only in case of necessity.



Cel. +57 320 256 9824
Calle 18 # 9-40, Oficina 201
Bogotá D.C
www.Worldvisioncompany.com.co



Main MediTech Co., Ltd

Add: 9#&10# of No. 776, JingWei Avenue, YuZhong District, ChongQing, China

Website: www.mainmeditech.com

Email: info@mainmeditech.com

Tel: +86 23 6373 2637

Supervisor Tel: +86 13618270311



Main Campímetro

20 años de experiencia profesional en mercado de campímetro

See More, See Future!

Presentación de Producto

❖ Goldmann estándar con fondo blanco y blanco

Cumple exactamente con el estándar goldmann, prueba de estimulación blanca con luz de fondo blanca

❖ Reconocimiento ocular automático y medición del diámetro de las pupilas

El sistema identifica automáticamente el OD / OS y la alarma indica al operador, lo que ayuda a evitar errores de operación antes / durante la prueba.

Medición automática del diámetro de la pupila, que es el elemento de referencia para la corrección de errores visuales por OD / MD.

❖ Chinrest-forehead rest controlado por AI

El sistema inteligente de chinrest-forehead realiza la alineación automática de la posición ocular de paciente.

El movimiento simultáneo de chinrest-forehead garantiza la comodidad y precisión de la prueba.



❖ Guía de Voz

Guíe a los candidatos cómo cooperar antes del examen e instruya a los pacientes a través de la Guía de voz durante todo el proceso de Examen.

❖ Revisión de puntos dudosos

Útil para la clínica, confirmar valores de puntos poco confiables evita la revisión de toda la prueba y ahorra mucho tiempo.


❖ Dicom

Operación de datos para cargar y descargar información del paciente.


❖ Prueba de Azul en amarillo (SWAP)

Modo de prueba de Glaucoma especializado (solo para SVF-9000 Pro)


Presentación de Software

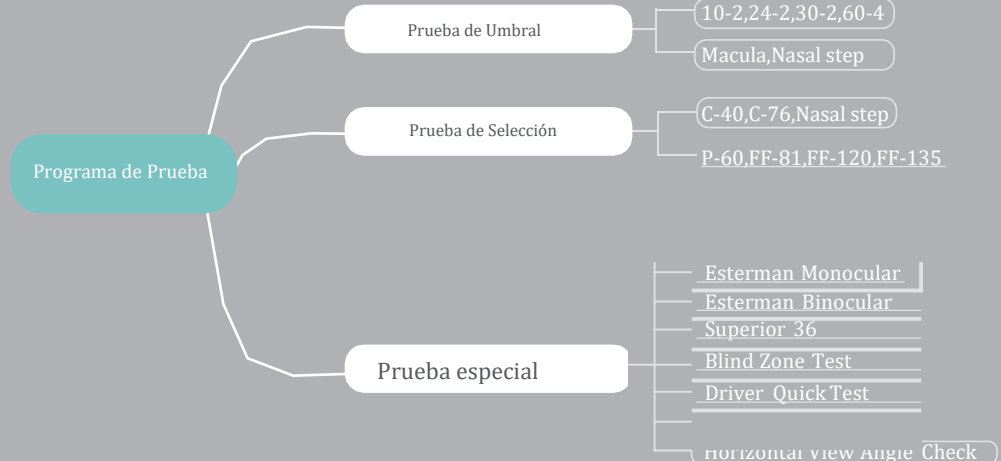

SVF-7000 Serie

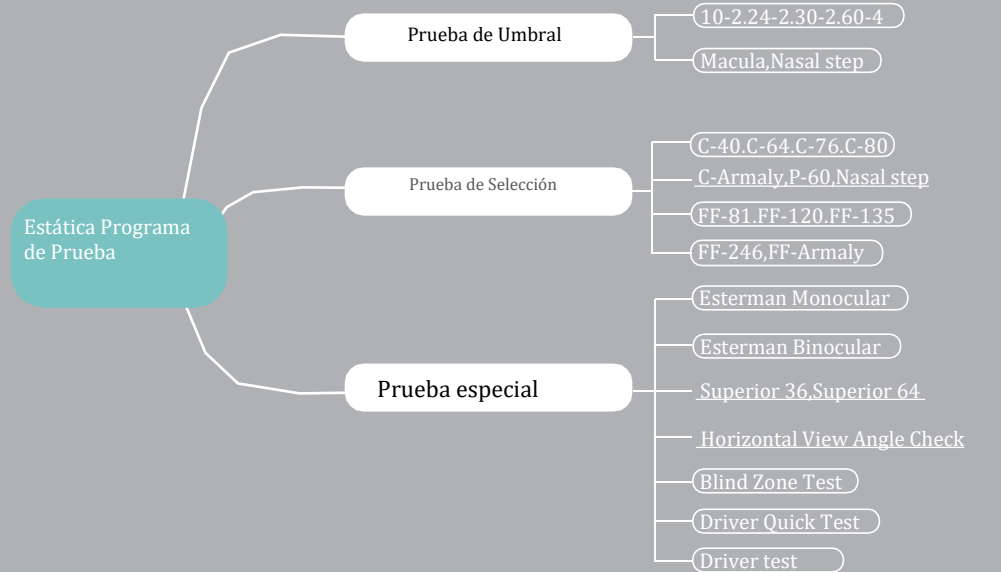


SVF-9000 Serie

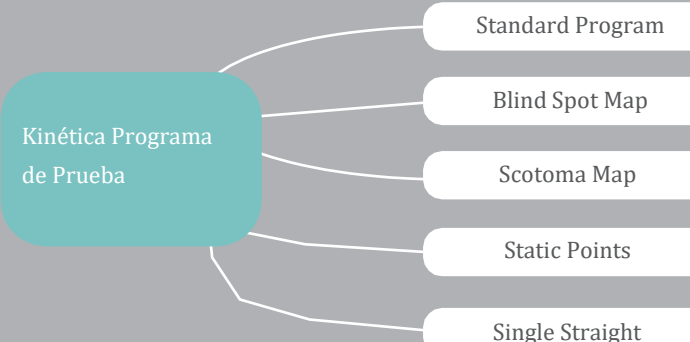

SVF-9000 Serie

Exclusivo

Presentación de Software

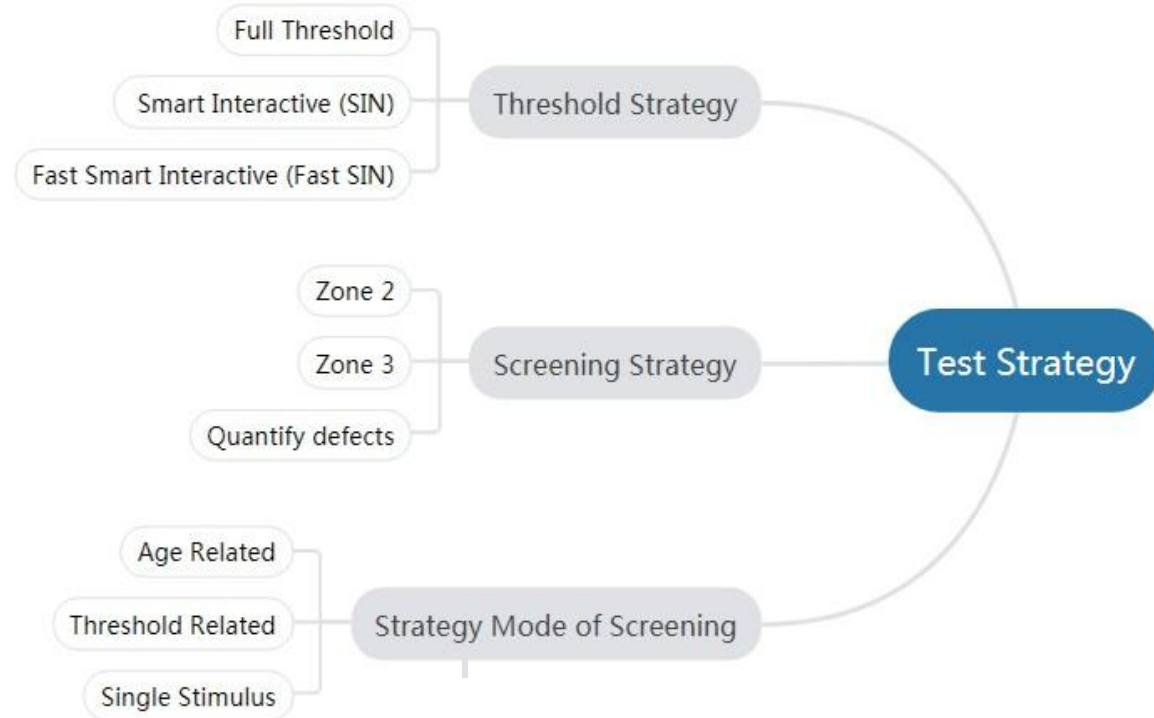

❖ Estrategia de prueba eficiente=Reducir tiempo de prueba+Precisión


La estrategia de prueba tiene en cuenta de los diferentes grupos de edad,la capacidad de respuesta y la visión.La regularidad de los defectos de campo,y isla visual, que ofrece una solución más rápida para las pruebas de campímetro,que es inteligente e interactivo.



See More,See Future!

Presentación de Software


- ❖ Sistema de monitoreo fijo múltiple
- ❖ Fiabilidad del seguimiento de Prueba

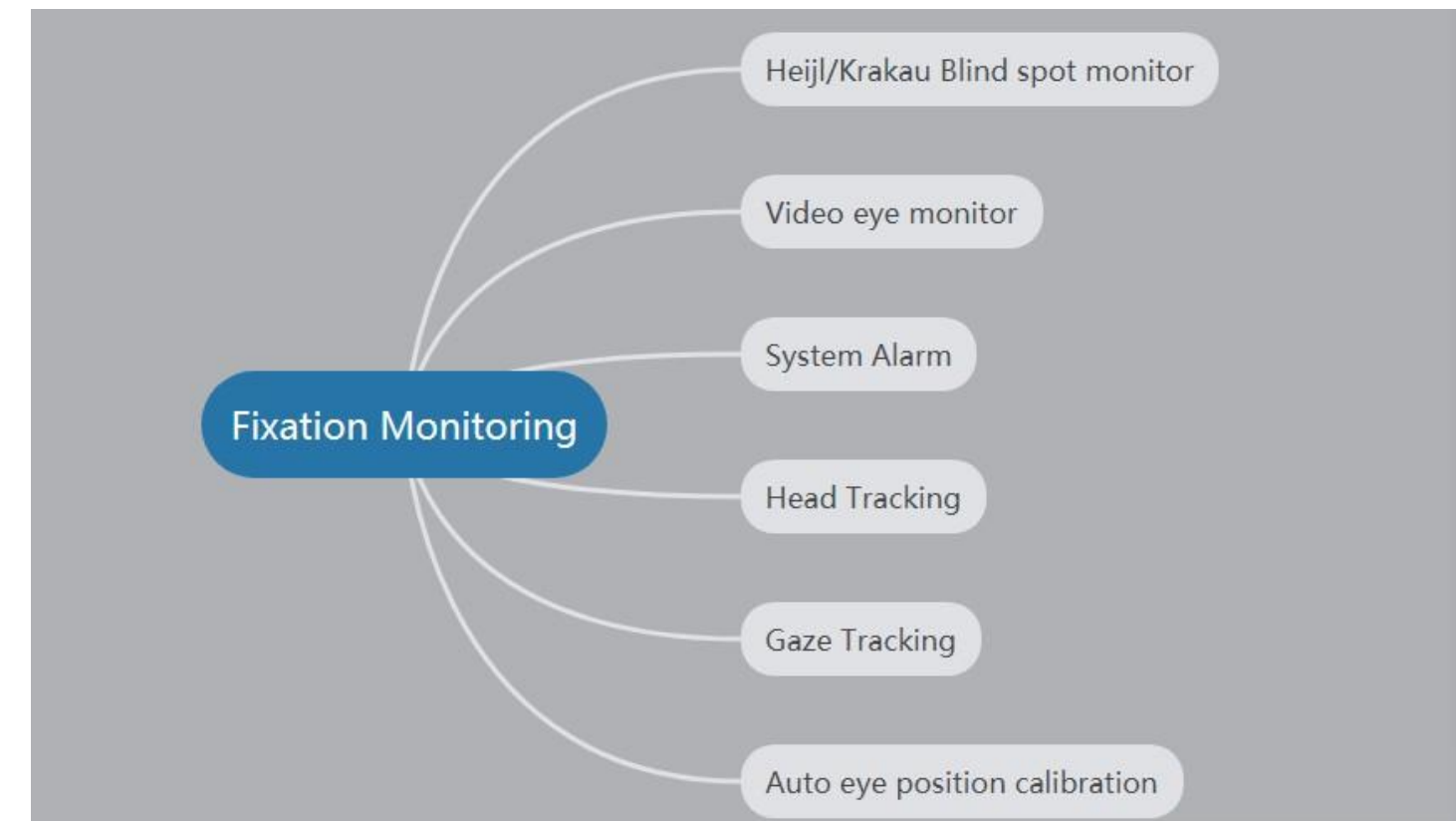

Curva de seguimiento de mirada



Rastreo ocular

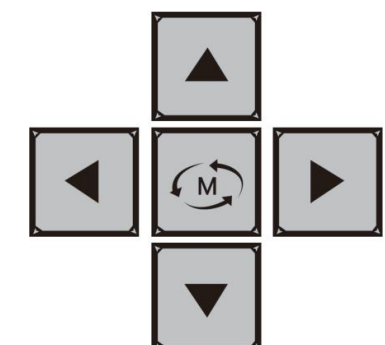


Control del reposabrazos Automático-manual opcional

See More,See Future!


Presentación de Software

Informe de prueba clásico



El informe de prueba está en un formato clásico y los médicos de todo el mundo pueden leerlo y entenderlo fácilmente.

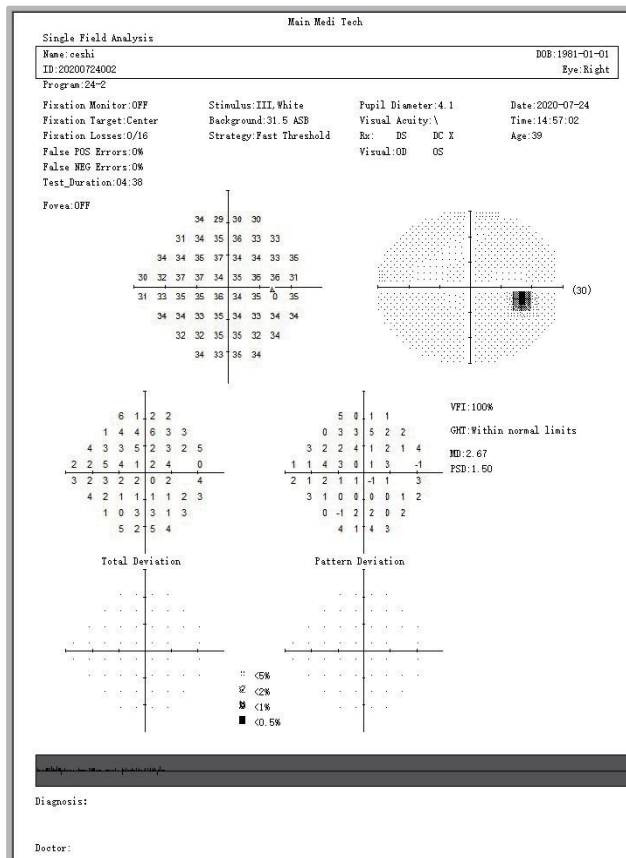

Informe Monocular

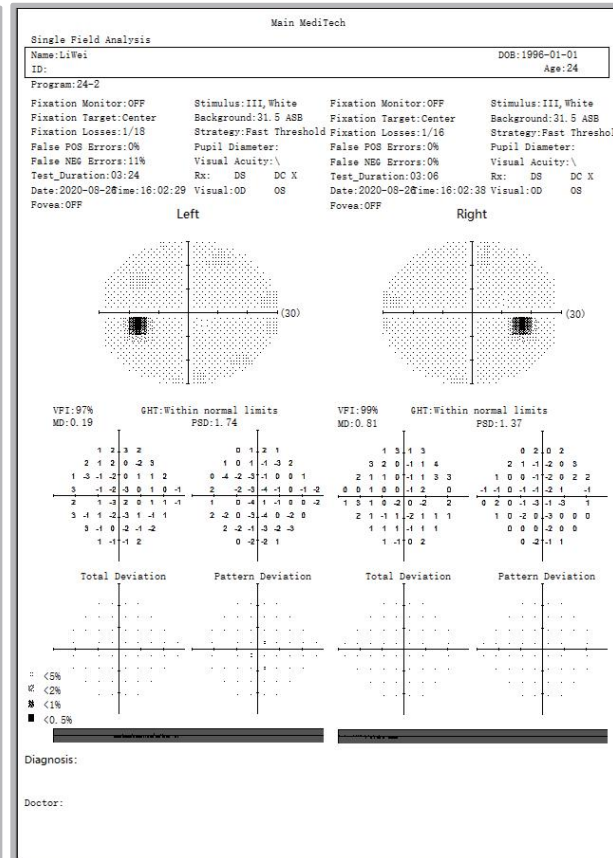

Informe Binocular

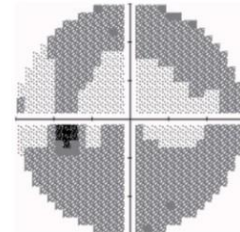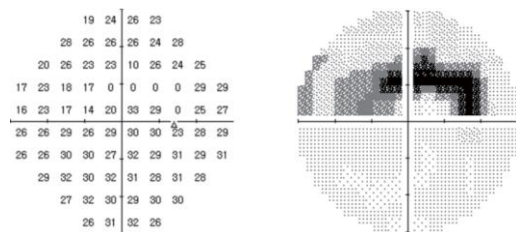

Parámetros Técnicos

Modelo			SVF-7000 Basic	SVF-7000 Pro	SVF-9000 Basic	SVF-9000 Pro
Parámetros						
Rango de valores de DB mostrado			0~40db		0~51db	
Rango de intensidad de estimulación			1asb~10000asb		0.08asb~10000asb	
Tamaño de estimulación			Goldmann III			Goldmann I-V
Color de estimulación			Blanco		Blanco	Blanco,Rojo,Azul
Duración de estímulo			200ms/ Adaptivo			
Rango máximo de medición			90°			
Distancia de prueba			30cm			
Tamaño de la esfera			Radius 300mm			
Iluminación de fondo			Blanco 31.5 asb (10cd/m2)			Blanco 31.5 asb /Amarillo 315asb
Modo de prueba			Estático		Estático & Kinético	
Número de estímulos			456 puntos		Infinito	
Plan de estímulo			Asférica			
Fuentes de estímulo			LED		Halógeno	
Control de Chinrest			Pantalla táctil, control de teclado y ratón, control de botones			
Movimiento de cabeza			Chinrest y forehead-rest mueve simultáneamente			
PC Configuración			CPU:1.6 GHz; RAM: 4 GB; Hard disk: 120 GB;			
			Sistema de operación: Windows 10;			
			LCD:14 " Capacitive Touch screen;			
			Internet: Ethernet & WIFI;			
Función de Software	Programa de Prueba	Programa de prueba de umbral	10-2, 24-2, 30-2, 60-4, Macula, Nasal Step			
		Programa de prueba de selección	C-40, C-76, P-60, Nasal Step, FF-81, FF-120,FF135		C-40, C-64, C-76, C-80, C-Armaly, P-60, Nasal Step, FF-81, FF-120, FF-135, FF-246, FF-Armaly	
		Programa de Prueba especial	Esterman Monocular, Esterman Binocular, Superior 36, Blind Zone Test, Horizontal View Angle check, Driver Test, Driver Quick Test	Esterman Monocular, Esterman Binocular, Superior 36, Horizontal View Angle check, Driver Test, Blind Zone Test, Driver Quick Test	Esterman Monocular, Esterman Binocular, Superior 36, Superior 64, Horizontal View Angle check, Driver Test, Blind Zone Test, Driver Quick Test	
		Programa Kinética	/	/	Standard program,Blind spot Map,Scotoma Map,static points, single straight	
	Estrategia de Prueba	Estrategia de Umbral	Full Threshold, Smart Interactive(SIN), Fast Smart Interactive(Fast SIN)			
		Estrategia de Selección	Zone 2, Zone 3, Quantify Defects			
		Estrategia de Prueba especial	Age Related, Threshold Related, Single Stimulus			
	Función de Análisis		Single Field Analysis, Multi Field Analysis, Reliability Analysis, GPA(Glaucoma progression Analysis), GHT(Glaucoma Hemi Field Test), VFI Index			
	Monitoreo fijo		Heijl/Krakau Blind Spot Monitor, Video Eye Monitor, System Alarm, Head Tracking, Gaze Tracking, Auto Eye Position Calibration			
	DICOM		●	●	●	●
	Guía de Voz		/	●	●	●
	Alarma de desviación fija		/	●	●	●
	Programa de prueba personalizado		/	●	●	●
	Reconocimiento automático de OD / OS		/	●	●	●
Dimension			480mm(L)*430mm(W)*528mm(H), 14kgs		480mm(L)*430mm(W)*560mm(H), 24 kgs	
Packaging			560mm(L)*500mm(W)*670mm(H), 21kgs		560mm(L)*500mm(W)*700mm(H), 28 kgs	